

MityOne®

Mity分娩用吸引カップ



MityOne®



Mity分娩用吸引カップ

児頭への負荷を最小限に
様々な手の大きさに対応した直感的な操作^{3,4}



カップは90度まで屈曲
スムーズな挿入^{2,3}

短いステムが特徴
カップ脱落リスク低減

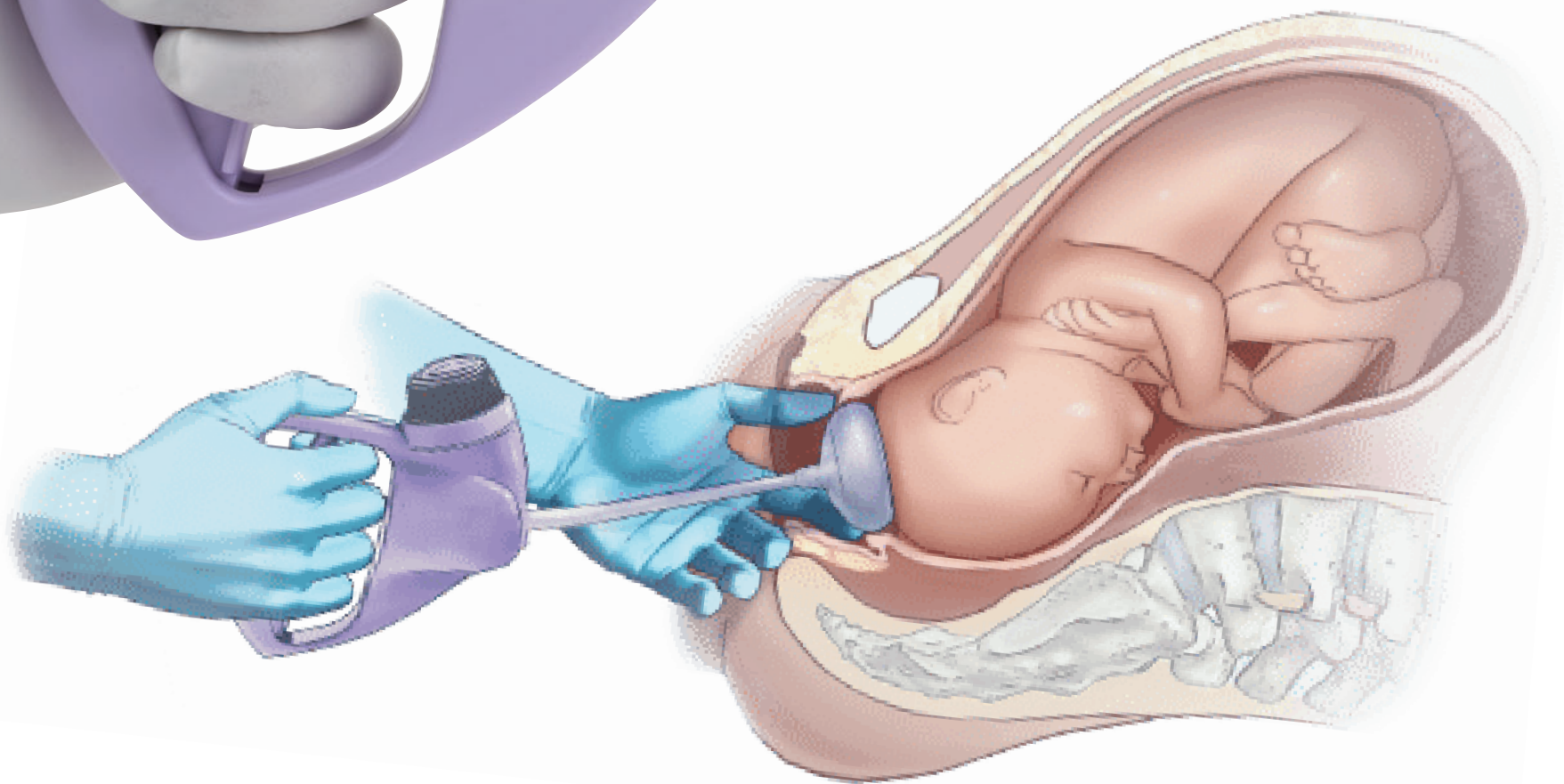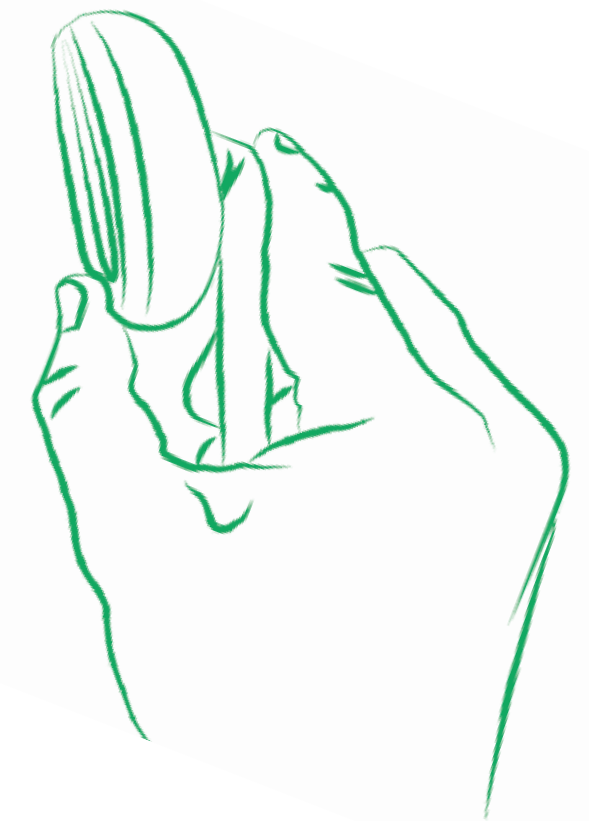


58cmHgの
リミッターゲージ付^{1,3}



1. Ali UA, Norwitz ER. Vacuum-assisted vaginal delivery. Rev Obstet Gynecol. 2009;2(1):5-17
2. Bofill JA, et al. A randomized trial of two vacuum extraction techniques. Reviews in Obstetrics and Gynaecology. 1997; 80(5, Part 1):643-797
3. 10067 MityOne® M-Style® Mushroom® Cup Instructions for Use. Trumbull, CT: CooperSurgical; April 2018,
4. Greenberg, James, MD. Procedure for Vacuum Assisted Vaginal Birth. In: UpToDate, Connor RF (ED), Wolters Kluwer. October 2023.

MityOne®

Mity分娩用吸引カップ

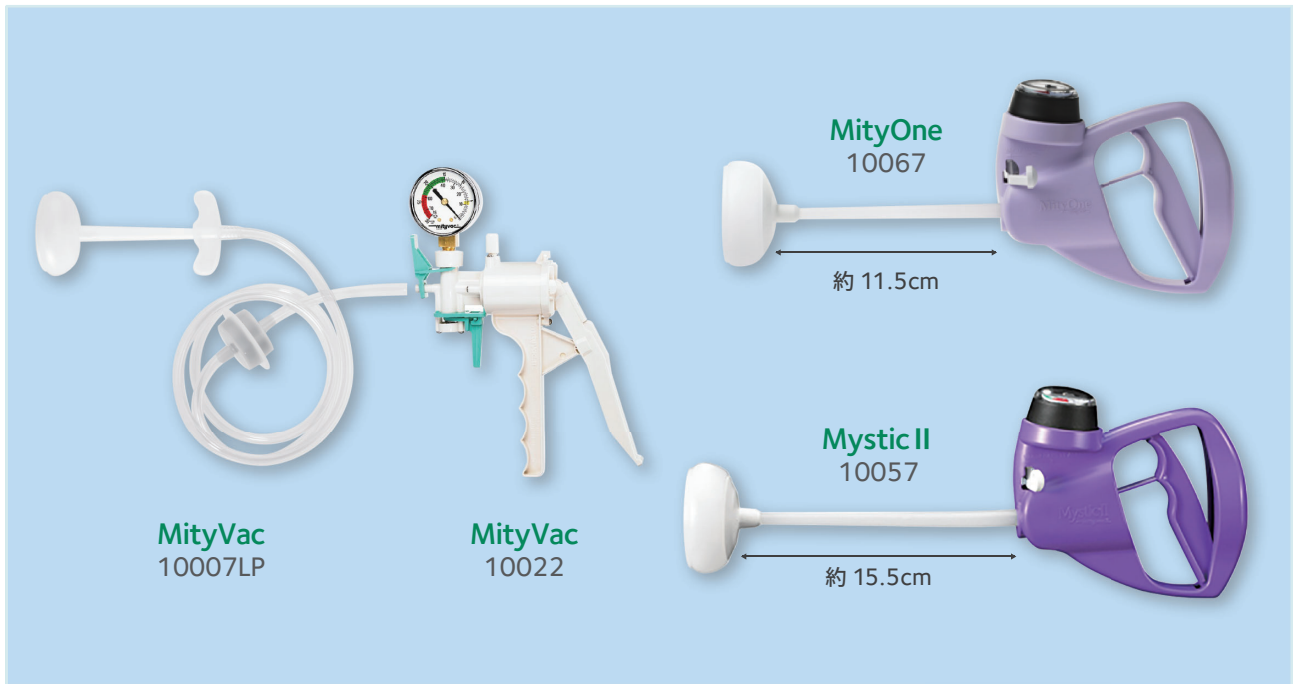

| 品番 | 製品名 | JANコード | 販売単位 (個/箱) |
|---------|----------------|---------------|------------|
| 10007LP | MityVac | 0888937003048 | 12 |
| 10022 | MityVac ハンドポンプ | 0888937003147 | 1 |
| 10057 | Mystic II | 0888937003109 | 12 |
| 10067 | MityOne | 0888937003123 | 12 |

【禁忌・禁止】

<適用対象 (患者) >

次のような状態が認められる場合、吸引を開始しないこと。
胎児に障害が発生するおそれがある。

- 1.胎児が非頭位(骨盤位または横位)、顔位または額位の状態である場合
- 2.児頭骨盤不均衡の可能性がある場合
- 3.頭皮採血を実施した場合
- 4.巨大児の可能性があり、または肩甲難産のおそれがある場合
- 5.吸引分娩または鉗子分娩が失敗した場合
- 6.妊娠34 週未満である場合

販売名 Mity分娩用吸引カップ
認証番号 305ADBZX00097000
一般的名称 手動式分娩用吸引器

製造販売元
クーパーサージカル・ジャパン株式会社
神奈川県横浜市中区日本大通11
横浜情報文化センター4F



東日本販売元

株式会社 東機貿

〒140-0002
東京都品川区東品川2-3-14 東京フロントテラス 3階
産婦人科製品部 tel.03-5762-7327 (fax.7313)
受注センター tel.0120-956-629 (fax.648)

<http://www.tokibo.co.jp>

西日本販売元

原田三誠メディカルサプライ 株式会社

〒564-0032
大阪府吹田市内本町3-26-29
tel.06-6318-2318 fax.06-6318-2317
URL <http://www.hsms.co.jp>

A Group of HARADA CORPORATION