


**CARTER-THOMASON**  
CloseSure System®

トロッカーポート閉鎖デバイス

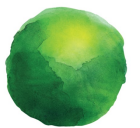

CooperSurgical®

# CARTER-THOMASON

CloseSure System®



パイロットガイドの穴をトロカール創に対して垂直に保ったまま、パイロットガイドを挿入する。


ニードル先端を閉じて、縫合糸をパイロットガイド、筋膜、筋、腹膜及び腹部に押し込む。

縫合糸を放してスーチャーパサーを抜去する。




ニードル先端を閉じる。

パイロットガイドの反対側にスーチャーパサーを押し込み、縫合糸を把持する。

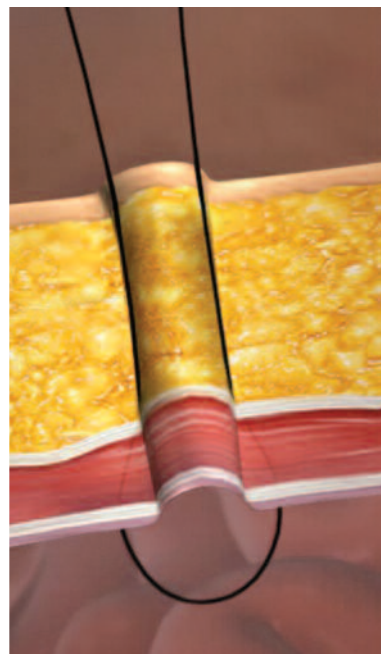

縫合糸を、腹膜、筋、筋膜及びパイロットガイドから引き上げる。

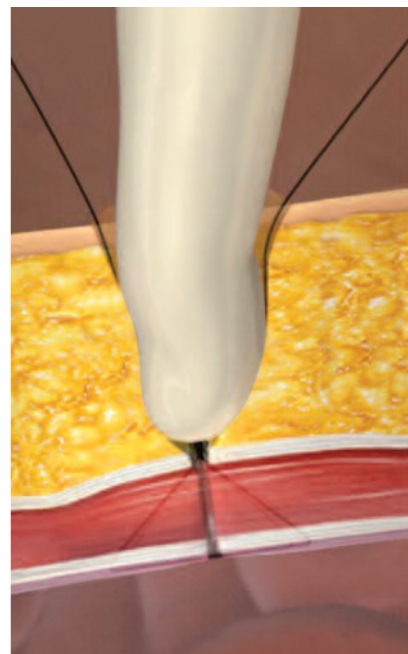

パイロットガイドを抜去する。


縫合糸を結紮して閉鎖を完了する。

規格・仕様

コード NO.	型番	仕様	セット内容	梱包単位
03173-300	CTI-512N	スーチャーパサー: シャフト径:2.8mm シャフト長:152mm パイロットガイド: 10/12mm 用 5mm 用	スーチャーパサー 1 本  パイロットガイド 10/12mm用 1個 5mm用 1個	5 本 /箱
03173-301	CTXL	スーチャーパサー: シャフト径:2.8mm シャフト長:178mm パイロットガイド: 10/12mm 用 15mmXL 用	スーチャーパサー1 本  パイロットガイド 10/12mmXL用 1個 15mmXL用 1個	3 本 /箱



**CARTER-THOMASON**  
CloseSure System®

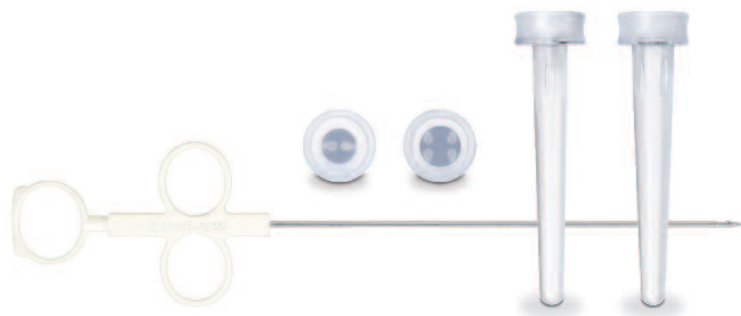

Carter-Thomason CloseSure System XL




CTXL

CTI-512N

パイロットガイドを上から見た図



5mm用  
10/12mm用

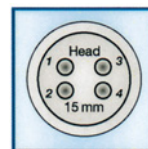

15mm用




実際のサイズ

 **原田産業株式会社**

HARADA 販売元

原田産業株式会社 メディカルチーム  
〒542-0081  
大阪府大阪市中央区南船場二丁目10番2号  
TEL.06-6244-0978 FAX.06-6244-0977

製造販売元  
クーパーサージカル・ジャパン株式会社  
〒231-0021  
神奈川県横浜市中区日本大通11  
横浜情報文化センター4F  
TEL 045-319-6580  
FAX 045-319-6581

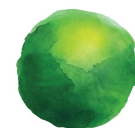

CooperSurgical®