



CARTER-THOMASON
CloseSure System®

トロッカーポート閉鎖デバイス

Carter-Thomason CloseSure System®



トロッカーポート閉鎖デバイス





規格・仕様

製品番号	製品名	仕様	セット内容	梱包単位
CTI-512N	Carter-Thomason クローズシュアシステム®	スーチャーパサー シャフト径：2.8mm シャフト長：152mm パイロットガイド 10/12mm 用 5mm 用	スーチャーパサー 1本 パイロットガイド 10/12mm 用 1個 5mm 用 1個	5本/箱
CTXL	Carter-Thomason クローズシュアシステム®	スーチャーパサー シャフト径：2.8mm シャフト長：178mm パイロットガイド 10/12mmXL 用 15mmXL 用	スーチャーパサー 1本 パイロットガイド 10/12mmXL 用 1個 15mmXL 用 1個	3本/箱

販売名：カーター・トマソン縫合器
分類：一般医療機器
届出番号：14B1X10025S00002
一般の名称：内視鏡処置用縫合器

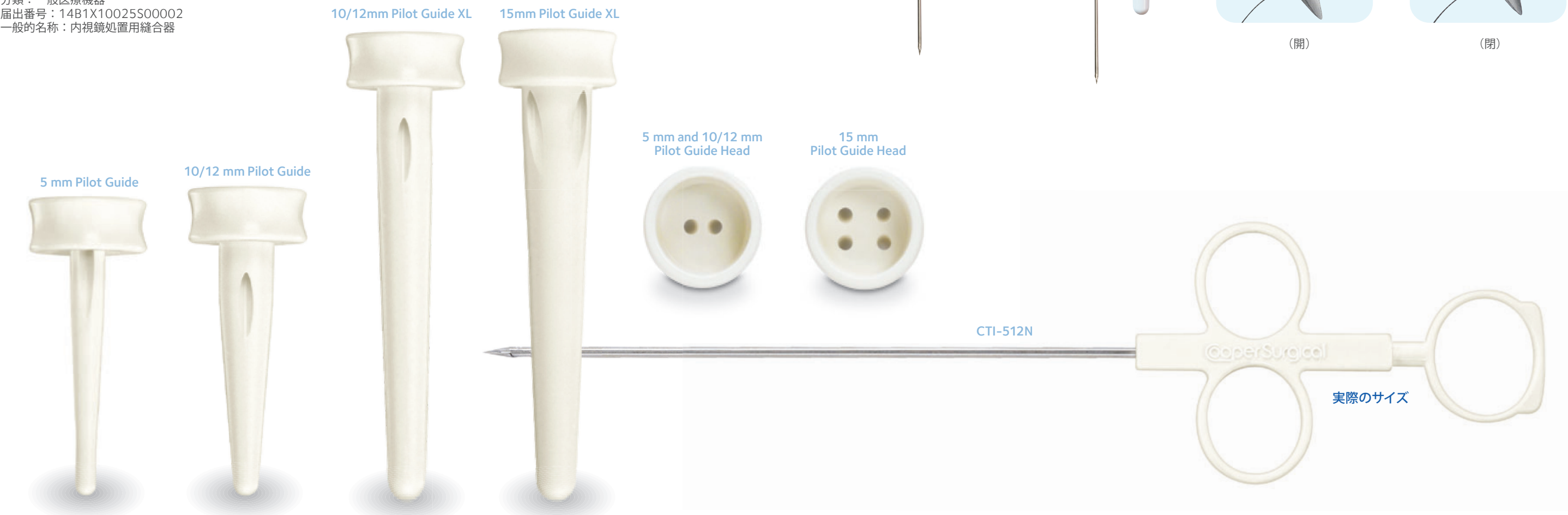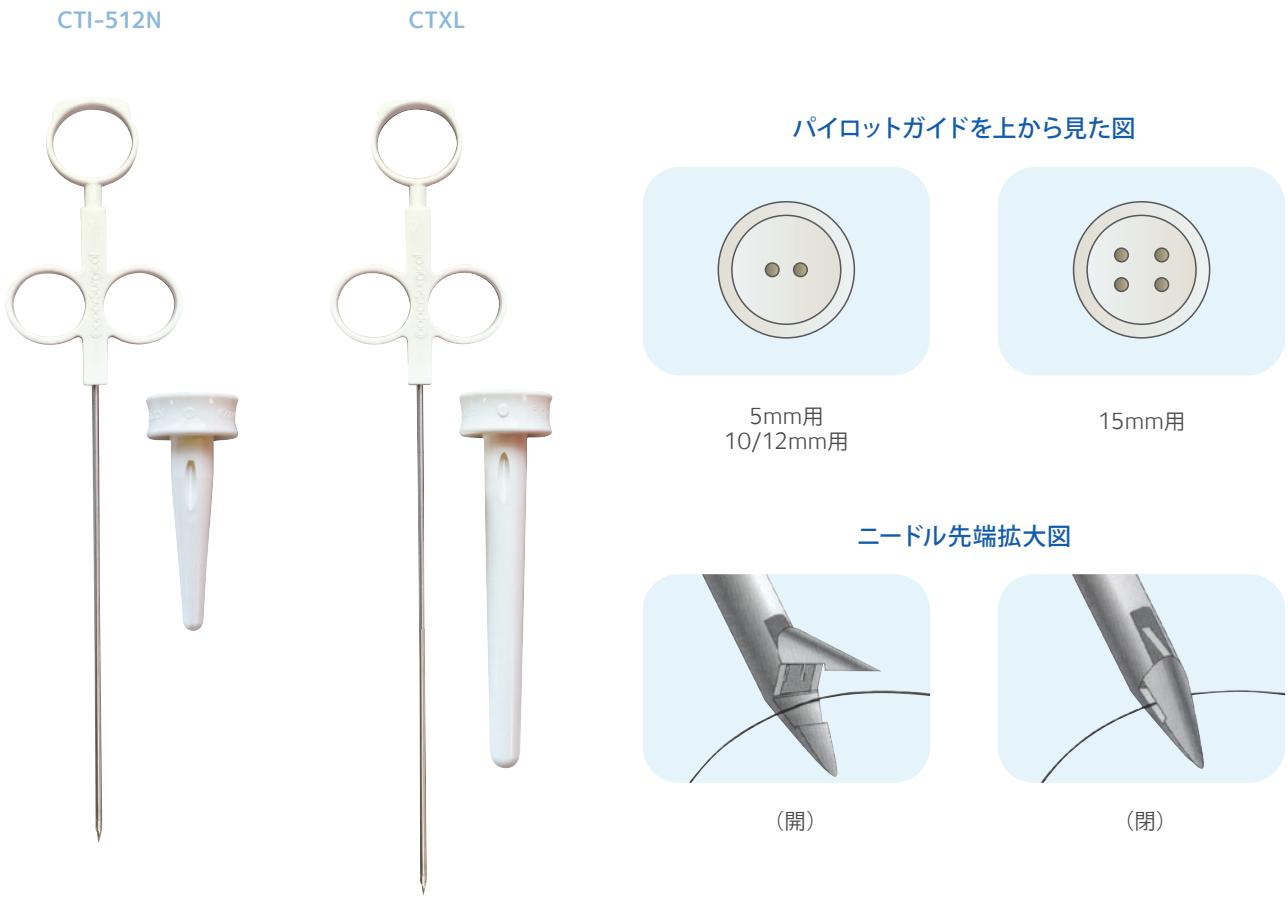

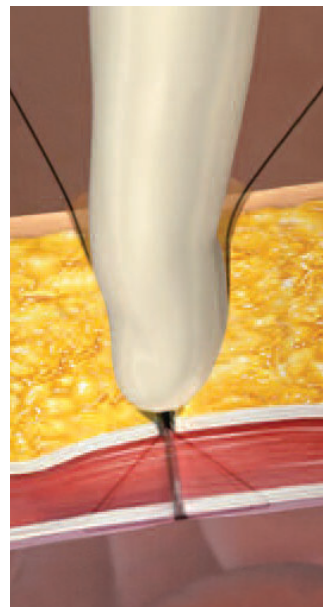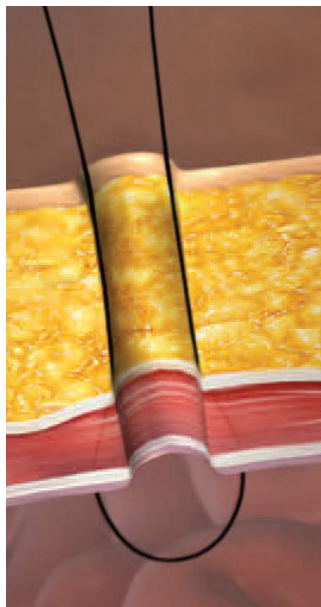

1. パイロットガイドの穴をトロカール創に対して垂直に保ったまま、パイロットガイドを挿入する。

ニードル先端を閉じて、縫合糸をパイロットガイド、筋膜、筋、腹膜及び腹部に押し込む。

縫合糸を放してスーチャーパサーを抜去する。

2. ニードル先端を閉じる。

パイロットガイドの反対側にスーチャーパサーを押し込み、縫合糸を把持する。

3. 縫合糸を、腹膜、筋、筋膜及びパイロットガイドから引き上げる。

4. パイロットガイドを抜去する。
縫合糸を結紮して閉鎖を完了する。

製造販売元
クーパーサージカル・ジャパン株式会社
〒231-0021
神奈川県横浜市中区日本大通11
横浜情報文化センター4F
TEL.045-319-6826 FAX.045-319-6581



CooperSurgical®