

Wallace リングペッサリー 子宮下垂/子宮脱治療用リング



子宮脱治療用にデザインされた製品です。

腔を支えることで子宮が下垂するのを防ぎます。

ペッサリーを挿入することで、膀胱と腸への圧迫を軽減します。

また、子宮変位を矯正し、尿道を圧迫することが原因の
腹圧性尿失禁を軽減することもできます。


特徴

- ・ 常温で柔らかく、挿入しやすく患者さまへの痛みが緩和。
- ・ 材質に弾力性があり、さらにリングの肉厚により、子宮を支えます。
- ・ 豊富なサイズバリエーションで患者さまにあったサイズ選択が可能。
- ・ 材質はポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ-2-エチルヘキシル）。




CooperSurgical®

ペッサリー挿入前

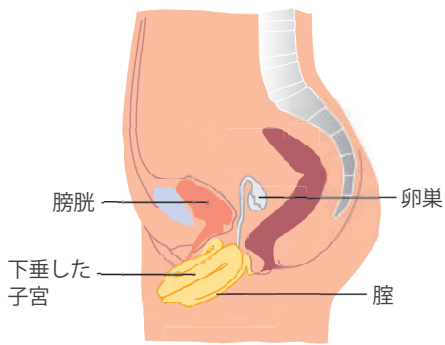

ペッサリー挿入後

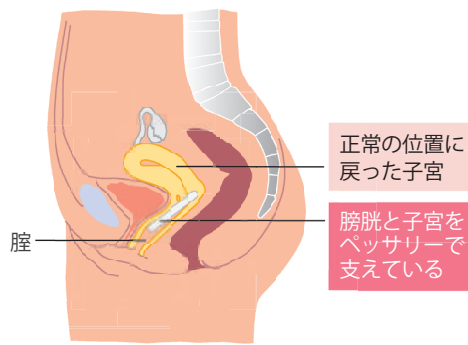

ご使用に際しての注意事項

- ・本製品は未滅菌で出荷されていますが、クリーンルームで製造されているので、パッケージから取り出して直ぐにそのままお使いいただけます。消毒や滅菌をする必要はありません。
- ・本製品をお湯（滅菌液）で暖めると、より柔軟性が増し、挿入し易くなります。
- ・使用するサイズは 2 本の指を膣内に挿入し、その指を広げて膣壁に接触させ、そのままの状態から抜いて測定します。測定したサイズと同等の外径のリングペッサリーを選択します。
- ・本製品は挿入後2～3ヶ月毎に取り出し、膣内の接触面を必ず観察してください。
- ・本製品は単回使用製品です。
- ・本製品をオートクレーブ（高圧蒸気）で滅菌しないでください。製品の変形や破損につながる可能性があります。オートクレーブやガス滅菌、プラズマ滅菌などをした際の製品の安全性は検証されていません。
- ・本製品に金属は含まれていません。本製品を装着したまま MRI 検査を受けても磁気誘引の危険は増加しません。

製品のパッケージ・仕様等は改良のため予告なく変更させていただく場合がございます。予めご了承ください。

ご使用の前に製品添付文書を必ずお読みください。

製造販売元
クーパーサージカル・ジャパン株式会社
〒231-0021
神奈川県横浜市中区日本大通 11
横浜情報文化センター 4F
【お問い合わせ電話番号】 045-319-6826
【注文用ファックス番号】 045-319-6581

代理店名

品番	製品名 / 外径サイズ (mm)	包装単位
700/300/XXX JP (XXX はサイズの種類)	Wallace リングペッサリー (50 / 53 / 56 / 59 / 62 / 65 / 68 / 71 / 74 / 77 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100 / 110)	1 箱 (2 個入り)

*未滅菌、原材料：ポリ塩化ビニル

※実物大のサイズ表をご用意しております。

販 売 名：Wallace リングペッサリー
承認番号：22000BZX01121000
一般的名称：骨盤臓器脱用ペッサリー



CooperSurgical®