


Bakri®
Postpartum Balloon

by  CooperSurgical®

シンプルな操作で 効果的に分娩後出血を管理する

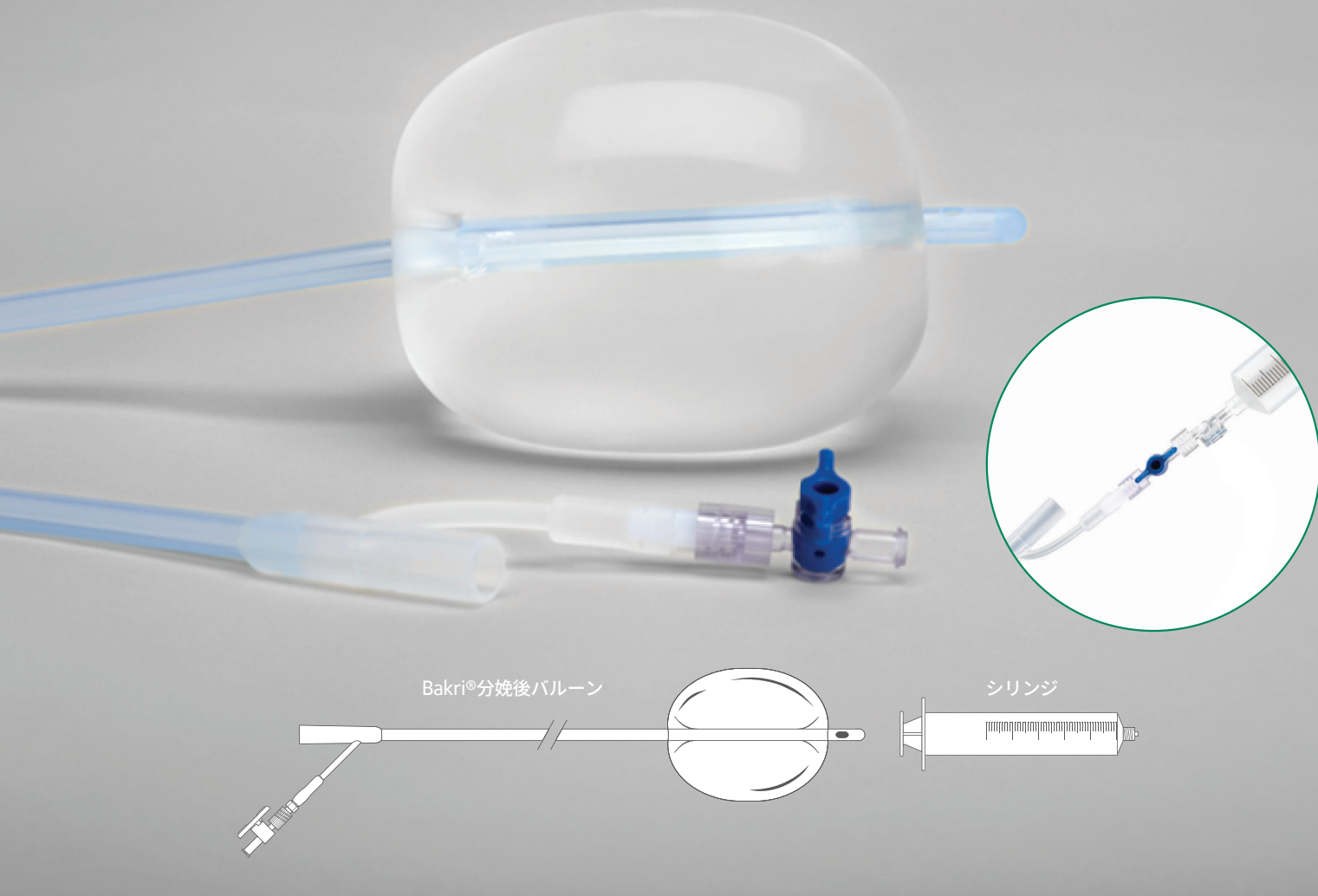

製品情報

製品番号	販売名	カテーテル	長さ	バルーン容量
J-SOS-100500	BAKRI分娩後バルーン	24 Fr	54 cm	500 mL

重要な安全性情報

Bakri® 分娩後バルーンは、保存の管理が必要とされる場合に、分娩後の子宮出血を一時的に管理または軽減することを目的とする単回使用デバイスです。

禁忌: 外科的検査または血管造影による塞栓術を必要とする動脈出血がある場合、子宮摘出が適応となる場合、妊娠、子宮頸癌、腫、子宮頸部もしくは子宮における化膿性感染、未治療の子宮異常、播種性血管内凝固症候群 (DIC)、または本品が出血を有効的に制御できない部位の出血がみられる場合は本品を使用しないでください。

警告: Bakri 分娩後バルーンは、分娩後 24 時間以内に発生する一次分娩後出血への使用を適応とします。本品を 24 時間を超えて留置したままにしないこと。滅菌液を使用した最大拡張量は 500 mL です。バルーンを過拡張させたり、空気、二酸化炭素またはその他のガスを使用しないでください。状態の悪化や改善がみられない徴候について、患者を綿密にモニタリングしてください。バルーンの使用中は患者の尿排出量をモニタリングしてください。

重要: バルーンの留置前に、子宮に残留している胎盤断片をすべて除去し、生殖系に裂傷や外傷がなく、出血源が動脈性でないことを確認してください。

販売名: BAKRI分娩後バルーン
承認番号: 22400BZX00334000
一般的名称: 子宮用バルーン

製造販売元
クーパーサージカル・ジャパン株式会社
〒231-0021
神奈川県横浜市中区日本大通11
横浜情報文化センター 4F
TEL.045-319-6826 FAX.045-319-6581


MD-Bakri-202604

分娩後出血 (PPH) の シンプルな解決法

バルーンタンポナーデは、子宮弛緩に続発する深刻な分娩後出血の治療で、特に薬物療法が奏効しない場合に効果的な補助手段となります。^{1,2,3}

Bakri 分娩後バルーンは、
保存的管理が必要とされる場合に、
分娩後の子宮内出血を一時的に管理
または軽減することを
目的として使用します。

4つのR

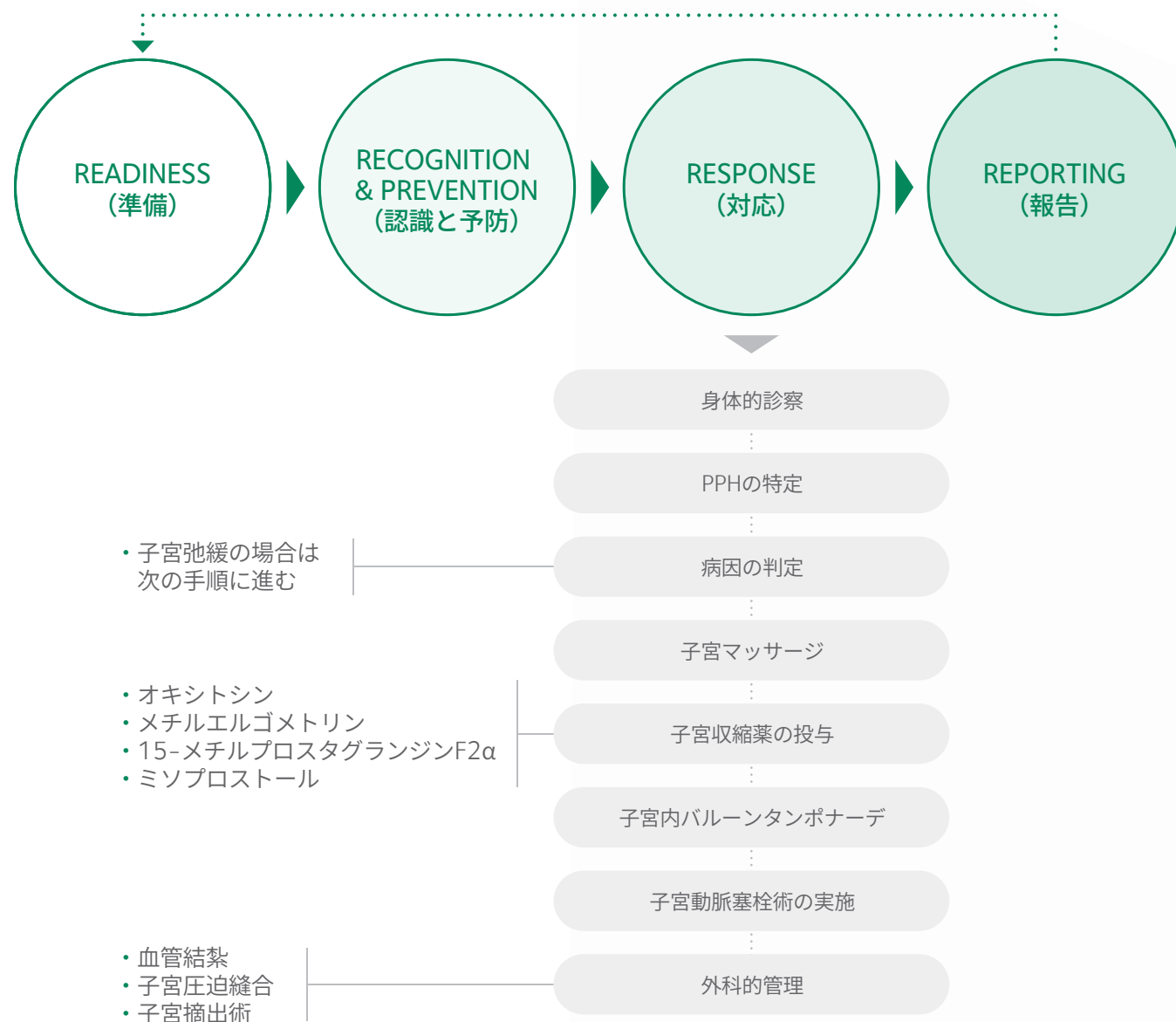

Bakri 分娩後バルーンを滅菌液で拡張させると、子宮壁に圧力がかかり、これによって分娩後出血の管理が可能となります。バルーンとカテーテルはすべてシリコンで作られています。

- 経膣分娩または帝王切開分娩後に使用可能
- 临床上適切と判断される場合は B-Lynch 圧迫縫合法と併用可能

1. California Maternal Quality Care Collaborative. Obstetric hemorrhage emergency management plan: table chart format. Version 2.0. Published 2014. Accessed August 31, 2016.
2. Committee on Practice Bulletins-Obstetrics. Practice bulletin no. 183: postpartum hemorrhage. Obstet Gynecol. 2017;130(4):e168-e186.
3. physicians.utah.edu/echo/pdfs/pregnancy-care-didactics/2016-09.09-postpartum-hemorrhage.pdf (accessed 29th October 2020).