

骨盤臓器脱用の ペッサリーについて



〈製造販売元〉
クーバーサージカル・ジャパン株式会社
〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通11 横浜情報文化センター4F
問い合わせ先：045-319-6580
製造元：CooperSurgical, Inc

販 売 名：Wallaceリングペッサリー
承 認 番 号：22000BZX01121000
一般の名称：骨盤臓器脱用ペッサリー

MD-Ring pessaryA5Orange-202604



【監修】
日本女性骨盤底医学会 理事長 古山 将康 先生
日本女性骨盤底医学会 ペッサリー委員会




骨盤臓器脱とは…

骨盤臓器脱とは、子宮や膀胱などが本来ある場所から下って腔の内腔にはまりこむ状態です。
放置すると、子宮や腔が体外に顔を出すこともあります。


ペッサリーとは…

骨盤臓器脱用にデザインされた
腔内に装着して腔や子宮が下垂するのを防ぐ医療機器です。
ペッサリーにより子宮が持ち上がると尿道がまっすぐになり、
いきまずにおだやかに排尿できるようになります。

ペッサリー挿入前

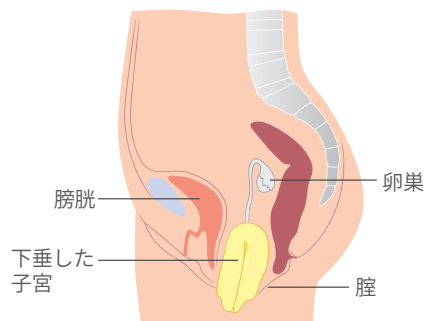


ペッサリー挿入後

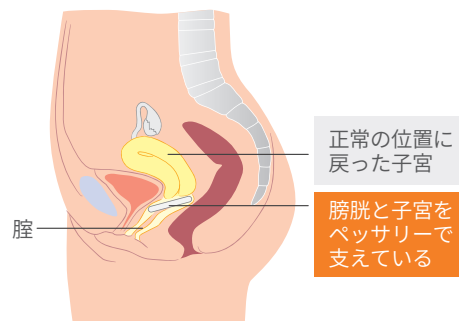

特徴

- ・材質に弾力性があり、さらにリングの肉厚により、子宮を支えます。

使用方法について

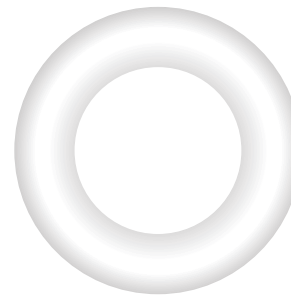

使用期間は
最長6ヶ月です。

- ✓ 使用開始時は、医師による診察を受け、適切なペッサリーのサイズを選んでもらってください。
- ✓ その後は、医師の判断のもと、定期的（最初の1年間は1～3か月毎、その後は1～6か月毎）に取り外し、腔内の接触面を診察してもらってください。



注意事項

- ・本品の脱着は医師もしくは医師の指示を受けた医療従事者の指示に従うこと。
- ・最長6カ月で新しいものに交換すること。
- ・腔や肛門からの出血、悪臭の強いおりもの、排尿や排便のトラブルなどがあるときには、すぐに担当医（医療機関）へ相談してください。